

FICHA TÉCNICA

PASTILLAS DE LIMPIEZA PARA AUTOCLAVE ICLAVE PLUS		
REFERENCIAS	18822	
FABRICANTE / RESPONSABLE	NAKANISHI INC. 700 Shimohinata, Kanuma Tochigi 322 – 8666 Japón	
CLASIFICACIÓN	Producto No Sanitario.	
DESCRIPCIÓN	Pastillas efervescentes especiales para la limpieza de la cámara de la autoclave. Cuando se colocan dentro de la cámara antes de iniciar el ciclo dedicado, eliminan los residuos de cal y suciedad de la caldera Características: Pastillas de mantenimiento para Autoclave Iclave. Colocar en el interior de la cámara. Elimina restos de cal y suciedad orgánicos.	
COMPOSICIÓN	Carbonato sódico, carbonato disódico compuesto con peróxido de hidrógeno, ácido cítrico, ácido silícico, sal sódica, ácido 1-hidroxietilideno) bifosfónico, sal sódica.	
ENVASE	Contenido: Blister con 10 pastillas.	
VIDA UTIL	1 a 3 años a partir de la fecha de fabricación.	
FINALIDAD	Estas pastillas están formuladas para eliminar residuos que pueden acumularse durante los ciclos de esterilización.	
INSTRUCCIONES DE USO	<p>6.1 CICLO PERIÓDICO AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA</p> <p>Para asegurar un correcto funcionamiento de su esterilizador es indispensable efectuar un mantenimiento adecuado. Por ello, insistimos sobre la importancia de efectuar una operación de limpieza como se ilustrará a continuación al menos una vez cada 15 días o, en caso de un uso intenso, cada dos cargas de agua.</p> <p> Para una mayor seguridad, después de cada 60 ciclos de esterilización sin ningún ciclo de limpieza, el esterilizador muestra la advertencia <NEED CLEANING >.</p> <p>IMPORTANTE <u>Quitar el porta bandejas y las bandejas de la cámara</u>, lavarlos con un detergente normal para vajilla, enjuagar abundantemente y secar. NO USAR SUSTANCIAS ABRASIVAS.</p> <p>ADVERTENCIA NO LLEVAR A CABO EL CICLO DE LIMPIEZA CON LAS BANDEJAS EN LA CÁMARA. Completar la limpieza de la superficie de la cámara cuando el esterilizador esté frío.</p> <p>NOTA Para abrir la puerta y llevar a cabo estas operaciones preliminares es necesario encender el esterilizador. Apagar la unidad cuando termine el mantenimiento para evitar un calentamiento excesivo. Volver a encender el aparato para cerrar la puerta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poner una pastilla de limpieza en la cámara y cerrar la puerta. LA CÁMARA DEBE ESTAR VACÍA 2. Seleccionar el ciclo C CLEANING 3. Pulsar START; este ciclo dura unos 15 minutos. 4. Al final del ciclo y después de que Ready se encienda, abrir la puerta y limpiar el interior de la cámara con un paño limpio levemente humedecido con agua desmineralizada y alcohol puro. No usar esponjas, cepillos o virutas o papel abrasivos. 	

FICHA TÉCNICA

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar las pastillas en un lugar fresco, con temperaturas entre 15 °C y 25 °C. Evitar exponerlas a temperaturas extremas (por debajo de 5 °C o por encima de 30 °C) ya que esto podría comprometer su efectividad.
--	---

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.