

## DESINFECTANTE ALTO NIVEL *neodisher SeptoActive*

### CONCENTRACIÓN PARA USO MANUAL EN BAÑOS DE INMERSIÓN

Litros de Agua	5 Litros	10 Litros	15 Litros	20 Litros	25 Litros	30 Litros
neodisher Septo Active	1 sobre	2 sobres	3 sobres	4 sobres	5 sobres	6 sobres

### FORMA DE DOSIFICACIÓN Y PREPARACIÓN

Llenar la cubeta con el volumen de agua fría a utilizar , a continuación disolver la cantidad de producto granulado correspondiente a la tabla de concentración , esperando 15 minutos para la activación de el preparado antes de la primera inmersión.

### TIEMPO DE CONTACTO

15 minutos de inmersión

Aclarar con abundante agua fría con calidad mínima de potable y secar  
Sustituir diariamente la solución

www.area-medica.com

**93 409 53 00**



5 Litros de Agua



100 gr de  
neodisher Septo Active  
(1 sobre )

