

DESINFECTANTE DETERGENTE - *neodisher® Septo PreClean*

CONCENTRACIONES DE USO PARA LIMPIEZA EN INMERSIÓN Y ULTRASONIDOS:

Litros de Agua	1 Litro	5 Litros	10 Litros	15 Litros	20 Litros	25 Litros
<i>neodisher® Septo PreClean</i>	15 ml	75 ml	150 ml	225 ml	300 ml	375 ml

PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

- 1º. Llenar la cubeta de agua (a temperatura ambiente) hasta alcanzar el volumen deseado.
- 2º. Aplicar la cantidad de *neodisher® Septo PreClean* en función de los litros de agua utilizados.
- 3º. Tiempo de contacto: 15 minutos de inmersión.
- 4º. Aclarar con agua a temperatura ambiente con calidad mínima de potable y secar.

www.area-medica.com

93 409 53 00

