

DETERGENTE neodisher® LM2

CONCENTRACIONES DE USO PARA LA LIMPIEZA MANUAL, POR INMERSIÓN O INMERSIÓN EN ULTRASONIDOS DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO Y PRODUCTOS SANITARIOS

Litros de Agua	1 Litro	5 Litros	10 Litros	15 Litros	20 Litros	25 Litros
<i>neodisher® LM2</i>	10 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200	250 ml

PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

- 1º. Llenar la cubeta de agua (a **temperatura entre 15-55°C**) hasta alcanzar el volumen deseado.
- 2º. Dosificar la cantidad de neodisher® LM2 en función de los litros de agua utilizados.
- 3º. Limpiar: manualmente, por inmersión o en ultrasonidos.
Tiempo de contacto: 10 minutos.
- 4º. Aclarar con abundante agua a temperatura ambiente con calidad mínima de potable y secar.

