


<b>FERMIN</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	<b>02054</b>	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>DETAX GmbH</b> Carl-Zeiss-Straße 4 76275 Ettlingen Alemania post@detax.de	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Producto Sanitario Clase IIa, según Reglamento (UE) 2017/745.	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Material para obturaciones provisionales, listo para el uso. Se endurece en la boca bajo el efecto de la saliva, gran fuerza de adherencia en la cavidad, excelente sellado marginal, fácil de remover y actúa bajo el efecto de la saliva en 15 minutos tras lo cual el paciente no puede exponerse a una gran presión de masticación durante 1 hora.</p> <p><b>Indicaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La aplicación se debe realizar en condiciones asépticas.</li> <li>-La aplicación del cemento puede provocar una irritación pulpar. Por esta razón hay que proteger la pulpa antes de aplicar el Fermin, si quede solamente una capa muy fina sobre la pulpa con la pulpa al descubierto.</li> <li>-Sólo para uso dental por personal especializado.</li> </ul> <p><b>Contraindicaciones:</b></p> <p>No aplicar directamente sobre la pulpa descubierta. Para proteger la pulpa, se aplica un relleno de base adecuado, p. ej., un preparado de hidróxido de calcio.</p>	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	-Estado físico: Pasta - Color: Blanco opaco - Olor: Inodoro.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Óxido de cinc, sulfato de cinc (hidrato) (mono-, hexa-, y hepta- hidrato), Trifenilfosfano y cemento temporal de relleno.	
<b>PRESENTACIÓN</b>	Contiene un frasco de 40 gr. (15 ml)	
<b>VIDA ÚTIL</b>	4 años.	
<b>FINALIDAD</b>	Obtención provisional de corto plazo de cavidades dentales.	
<b>INSTRUCCIONES DE USO</b>	Ver instrucciones en el producto.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Conserve el producto a una temperatura de 15 °C a 25 °C. Conservar exclusivamente en su envase original en un lugar fresco y seco y mantener bien ventilado.	



Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.