



FinalTouch

MATERIAL DE CARACTERIZACIÓN FOTOPOLIMERIZABLE

Mirar al espejo

No existe nada parecido a un diente con un color uniforme global. Las áreas de esmalte translúcidas, las decoloraciones en torno al cuello del diente, las decoloraciones de las fisuras, las manchas blancas, las opacidades del esmalte: todo esto suele formar parte del aspecto que tienen los dientes naturales.

Así pues, para que una restauración tenga el aspecto de un diente real, no tiene que ser necesariamente de color perfecto y uniforme. Es mucho más probable que el paciente pida la acentuación y reproducción de características realistas.

A fin de maximizar el «aspecto» natural, el color entrará en juego una y otra vez.

5 colores para obtener resultados naturales y estéticos

Áreas de aplicación

Blanco

- Opacidades del esmalte, depósitos de calcio, manchas blancas
- Efectos halo
- Acentuación de las cúspides y crestas
- Enmascaramiento de sustancia dental dura descolorida

Azul

- Áreas de esmalte translúcido y zonas opalescentes

Amarillo, naranja

- Decoloraciones en torno al cuello del diente
- Resaltado del núcleo de dentina
- Acentuación de fisuras
- Características individuales del esmalte

Naranja, marrón

- Grietas del esmalte, pigmentación de fisuras

Reproducción de fisuras al colocar obturaciones

FinalTouch marrón – utilizado en combinación con Admira® Fusion



Colocación de obturación de clase I en la cavidad y esculpido de las muescas finas como patrón de caracterización



Aplicación de FinalTouch marrón en la muesca esculpida



Recubrimiento con una capa final de material de restauración



Restauración completada, altamente estética y de aspecto natural, posterior al acabado final y a los distintos pasos de pulido

Fuente: Dr Mauricio Watanabe, Brasil

Trabajo de corrección estética en pieza dental 12

FinalTouch blanco, azul, naranja – utilizado en combinación con Amaris®

Construcción del tercio incisal-facial utilizando el sistema Amaris y FinalTouch para la caracterización.

Moldeado de los elementos internos (punta de mamelón) y reproducción de hipomineralización utilizando FinalTouch blanco. Caracterización del lóbulo de dentina central con FinalTouch naranja y definición de la opalescencia de los ángulos incisales con FinalTouch azul.



Situación inicial

Fuente: Dr Clarence Tam, Nueva Zelanda



Resultado final: estética de aspecto natural

Corrección de la forma del arco dental con carillas de aspecto natural

FinalTouch blanco y marrón – utilizado en carillas de composite



Incisivos centrales superiores demasiado cortos en relación con los incisivos laterales superiores, presentando además un pequeño diastema



Se añade un toque individual de color a las carillas: caracterización del borde incisal con FinalTouch blanco, y la superficie vestibular con marrón



Restauraciones aplicadas, completamente adaptadas a los incisivos centrales y dientes adyacentes



El paciente satisfecho, mostrando su arco dental ahora perfecto después del trabajo de corrección

Fuente: Dr Luiz Gustavo Barotte Albino, Brasil

Caracterización que satisface las expectativas más exigentes

Indicaciones

Caracterización individual de restauraciones con composite directas e indirectas

Recubrimiento cromático de pigmentaciones del diente

Caracterización de carillas CAD / CAM realizadas en el consultorio



Ventajas

- Reproducción de características del esmalte
- Ampliación perfecta a los materiales de restauración de composite y de ORMOCER® de VOCO
- Excelente manejo para obtener unos resultados altamente estéticos
- Fina estructura del material y consistencia homogénea para una aplicación precisa
- 5 colores con opacidad correspondiente al área de aplicación

Presentaciones

- REF 2321 Set jeringa 5 × 1,5 grs. (blanco, azul, amarillo, naranja, marrón), accesorios
- REF 2323 Jeringa 1,5 grs. blanco, accesorios
- REF 2324 Jeringa 1,5 grs. azul, accesorios
- REF 2325 Jeringa 1,5 grs. amarillo, accesorios
- REF 2326 Jeringa 1,5 grs. naranja, accesorios
- REF 2327 Jeringa 1,5 grs. marrón, accesorios
- REF 2147 Cánulas de aplicación tipo 45, 100 u.

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Alemania

Línea gratuita:
00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-140
info@voco.com · www.voco.dental

Distribuidor: