


FICHA TÉCNICA

RIVA SC HV CÁPSULAS		
REFERENCIAS	63550: RIVA SC HV A2. 65758: RIVA SC HV A3.	
FABRICANTE / RESPONSABLE	SDI LIMITED 3-15 Brunsdon street Bayswater, Victoria 3153 Australia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según Directiva 93/42/CCE.	
DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Riva Self Cure HV es un material restaurador de autofraguado y de alta viscosidad. - Para uso en la odontología mínimamente invasiva (MID) ya que es un material bioactivo que previene el brote de caries. - Se conserva la estructura dental natural, de manera que no es necesario realizar cavidades mayores ni desgastes. - Alta liberación de flúor que ayuda a remineralizar del diente. - No contiene Bisfenol A ni HEMA. <p>INDICACIONES DE USO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Restauraciones Clase I y II sin carga Restauraciones en dientes deciduos Restauraciones geriátricas Restauraciones intermedias y como material de base en cavidades Clase I y II, usando la tecnica de sandwich Restauraciones cervicales (Clase V) Reconstrucción de munones Obturaciones provisionales Material restaurativo adaptable a la tecnica ART Como remplazo de la dentina 	

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIÓN	SISTEMA EN CÁPSULA:			
		Riva Self Cure	Riva Self Cure	Riva Self Cure HV
	Fragüado	REGULAR	RÁPIDO	
	Émbolo	(Verde)	(Mostaza / Blanco*)	(Naranja)
	Índice de Polvo/Líquido (g/g)	0.42 / 0.12	0.42 / 0.12 0.40 / 0.15*	0.50 / 0.12
	Tiempo de mezcla (min, seg.)	10 seg	10 seg	10 seg
	Tiempo de manipulación (min., seg.)	1'40"	1'05"	1'30"
	Tiempo inicial de fragüado @ 23°C (min., seg.)	4'10"	2'30"	3'00"
	Tiempo de acabado @ 37°C desde el inicio de la mezcla (min.,seg.)	6'00"	4'30"	5'00"
	Aplicación mínima/cápsula	0.13mL	0.13mL	0.12ml
Condiciones de ensayo: temperatura (23 ± 1°C), humedad relativa (50 ± 10%)				
COMPOSICIÓN	Acide) poly(acrylique y acide (2R,3R)- 2,3-dihydroxybutanedioïque.			
CONTRAINDICACIÓN	Sellado de superficies pulpares. Este producto puede ocasionar irritaciones en la piel de algunas personas.			
PRESENTACIÓN	50 cápsulas.			
VIDA ÚTIL	2 a 3 años a partir de la fecha de fabricación.			
FINALIDAD	Riva Self Cure es útil para una amplia gama de aplicaciones restaurativas.			
INSTRUCCIONES DE USO	Ver en las instrucciones del producto.			
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	-No retire las capsulas Riva Self Cure de su empaque de aluminio antes que estén listas para usarse. -Usar a temperatura ambiente entre los 20°C y 25°C (68°F - 77°F).			

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.