



¡ Para no complicarse !

Monobond® Plus

**Un único Primer para
todos los materiales**

- Cerámicas de vidrio
- Aleaciones de metales preciosos
- Cerámicas de óxido de circonio
- Cerámicas de óxido de aluminio
- Aleaciones Cr-Ni / Cr-Co
- Composites (restauraciones indirectas)



Monobond[®] Plus

Un Primer

Por primera vez, se dispone de un **único** Primer que puede utilizarse para acondicionar **todo tipo de superficies de restauraciones:** Monobond[®] Plus.

La innovadora combinación de tres diferentes grupos funcionales – metacrilato de silano, metacrilato de ácido fosfórico y sulfuro metacrilato – permite establecer **una adhesión fuerte y duradera**, con cualquier material utilizado para una restauración dental.

Un tiempo de reacción

Monobond Plus requiere el mismo tiempo de reacción sobre cualquier superficie de material, lo que facilita aún más el procedimiento de cementación de restauraciones.

- Preparar la superficie de la restauración
- Aplicar Monobond Plus y dejar actuar durante 60 segundos
- Dispersar el sobrante con aire

¡Hecho!

Fácil almacenamiento

Monobond Plus, no requiere condiciones especiales de almacenamiento, ya que puede almacenarse a **temperatura ambiente**.

Además, Monobond Plus ayuda a facilitar el stock de productos. Solo se necesita **un único Primer** para todos los diferentes materiales de restauración.



Formas de suministro

Refill
1 frasco Monobond Plus 5 g



**Monobond Plus le hace
la vida un poco más fácil –**

**¡EN CUANTO A LA CEMENTACIÓN
DE RESTAURACIONES SE REFIERE!**

Las descripciones y datos no constituyen garantía de sus propiedades.
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
es/2014-07

Ivoclar Vivadent S.L.U
Carretera de Fuencarral nº 24
Portal 1 – Planta Baja
28108-Alcobendas (Madrid)
Spain
Telf. +34 91 375 78 20
Fax +34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.es

**Ivoclar Vivadent
Marketing Ltd.**
Calle 134 No. 7-B-83, Of. 520
Santafé de Bogotá
Colombia
Tel +57 1 627 33 99
Fax +57 1 633 16 63
www.ivoclarvivadent.co

Ivoclar-Vivadent S.A. de C.V.
Insurgentes Sur No. 863
Piso 14, Col. Napoles
03810 México, D.F.
México
Tel. +52 (55) 50 62 10 00
Fax +52 (55) 50 62 10 29
www.ivoclarvivadent.com.mx

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

**ivoclar
vivadent[®]**
passion vision innovation