


FICHA TÉCNICA

SONDA DE EXPLORACION N. DG16 ENDODONCIA		
REFERENCIAS	0653	
FABRICANTE / RESPONSABLE	HU-FRIEDY MFG. CO., LLC 3232 N. Rockwell St. Chicago, IL 60618 - USA	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según el Reglamento (UE) 2017/745 MDR.	
DESCRIPCIÓN	Explorador endodoncia DG16.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.	
ENVASE	1 unidad.	
INSTRUCCIONES DE SEGURO	Los dispositivos son reutilizables, y es necesario limpiarlos y esterilizarlos antes de cada uso. Si hay alguna indicación de óxido, el instrumento no debe usarse.	
LIMPIEZA Y ESTERILIZACION	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. El final de la vida útil de los instrumentos viene determinado por el desgaste y los daños durante el uso, y los instrumentos deben inspeccionarse para detectar defectos durante el proceso de limpieza preliminar. Esterilizable en autoclave o calor seco.	
FINALIDAD PREVISTA	Los exploradores son instrumentos que se emplean para la detección de caries y cálculos, para la exploración de las características de la bolsa, furcaciones y restauraciones. Los exploradores endodónticos también se utilizan para localizar orificios.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.