

Instrunet Inibsa Toallitas

Toallitas desinfectantes
de acción rápida,
listas para usar para
los productos sanitarios
de la clínica dental.

Sin aldehídos.
Agradable olor a limón.



Indicaciones y características

Indicadas para la correcta desinfección de aquellos elementos del box de difícil acceso con un desinfectante en formato spray como por ejemplo los tubos de elementos rotatorios del sillón dental.
120 toallitas de gran tamaño: 130 x 190 mm. Formulación sin aldehídos ni colorantes. Agradable olor a limón. Amplio espectro de eficacia.

Modo de empleo

Antes de utilizar, verificar que la zona a tratar esté limpia y sea compatible con el alcohol. Siempre utilizar en los productos sanitarios previamente limpios.

- 1 Aplicar en toda la zona que se vaya a tratar utilizando tantas toallitas como sea necesario.
- 2 Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada.
- 3 Enjuagar abundantemente con agua del suministro las zonas tratadas destinadas a entrar en contacto con la piel o las mucosas. Repetir la aplicación cada vez que sea necesario.
- 4 Cerrar bien el envase tras cada apertura.

Importante: no reutilizar la toallita ya que la desinfección no podría garantizarse. Los aparatos eléctricos a desinfectar deben estar desconectados de la red. No reutilizar la toallita ya que no se podrá garantizar la desinfección. Duración de uso después de la apertura del bote: 3 meses.

Composición

Etanol (N° CAS 64-17-5): 550 mg/g, propionato de N,N-didecil-N-metil-poli(oxietil)amonio (N° CAS 94667-33-1): 1,1 mg/g, perfume.

Precauciones de uso

PELIGRO. Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar gafas y máscara de protección. Eliminar el producto y su recipiente tomando todas las precauciones de uso. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consultar al **Servicio Médico de Información Toxicológica**, tel.: **915620420**.

Propiedades solución de impregnación en condiciones de limpieza

Eficacia	Normas	Tiempo contacto
Bactericida	EN 13727	30 segundos
Levuricida	EN 13624	30 segundos
Tuberculicida	EN 14348	30 segundos
Micobactericida	EN 14348	5 minutos
Fungicida	EN 13624	5 minutos
Activo en virus encapsulados	EN 14476	30 segundos
Virucida de espectro limitado	EN 14476	5 minutos (Adenovirus en 30 segundos Norovirus (MNV) en 5 minutos)

La actividad antimicrobiana del producto se recoge en el dossier científico, disponible bajo petición.

Distribuido por:

Laboratorios Inibsa, S.A. Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5 - 08185 Lliçà de Vall, Barcelona (España). T +34 938 609 500 | F +34 938 439 695

Laboratories Anios. 1, rue de L'Espoir - 59260 Lezennes. T +33 320 676 767 | F +33 320 676 768

Contacta con nosotros: **900 052 240** | www.inibsa.es | dental@inibsa.com

Síguenos en:  