

dima Print: resinas 3D

Tiempos de limpieza y curado

	Material	Indicación	Color	Limpieza en isopropanol (cara Print Clean)	Post curado (HiLite Power 3D)
	dima Print Cast ruby	Esqueléticos / coronas y puentes (hasta 5 unidades) / cerámica prensada	Rojo	Limpieza previa: 1 minuto Limpieza posterior: 1 minuto	3 minutos (1,5 minutos anverso + 1,5 minutos reverso)
	dima Print Splint clear	Férulas	Transparente clear	Limpieza previa: 3 minutos Limpieza posterior: 2 minutos	6 minutos (3 minutos anverso + 3 minutos reverso)
	dima Print Stone beige	Modelos dentales	Yeso color beige	Limpieza previa: 3 minutos Limpieza posterior: 2 minutos	10 minutos (5 minutos anverso + 5 minutos reverso)
	dima Print Stone teal	Modelos de ortodoncia / Alineadores*	Turquesa		
	dima Print Gingiva Mask	Encía desmontable	Rosa		
	dima Print Ortho	Férulas	Transparente azul claro		
	dima Print Impression Blue	Cubetas de impresión	Azul opaco		
	dima Print Guide	Guías quirúrgicas	Transparente naranja claro		
	dima Print Cast	Estructuras calcinables para esqueléticos	Frambuesa		

Consulte las instrucciones de uso de cada material. *Producción de alineadores mediante técnica de vacío.



Descubra el sistema completo de impresión 3D
kulzer.es/cara-print

Contacto en España

Kulzer Iberia S.A.
Marie Curie 19 bajo, ofic. 5
28521 Rivas Vaciamadrid
Madrid

kulzer.es

Salud oral en buenas manos



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP